

BRIS POVRŠINSKE RANE MIKOLOŠKI

UPUTA ZA UZIMANJE – područje rane potrebno je isprati sterilnom fiziološkom otopinom, potom uzeti bris pamučnim štapićem, prethodno navlaženim sterilnom fiziološkom otopinom, rotirajućim pokretom. Potrebno je uzeti dva brisa – iz dubine rane te sa rubnog dijela prema zdravom tkivu.

TRANSPORT – bris je potrebno transportirati bez transportnog medija do 2 h na sobnoj temperaturi od trenutka uzimanja ili u transportnom mediju (Stuart, Amies) do 24 h na sobnoj temperaturi od trenutka uzimanja.

KOLIČINA UZORKA - bris sa ili bez transportnog medija.